


آزمایش گلوکوز خون




وقتی که سمبول قطره جلوه ای ظاهر می شود، با اله لینسنگ از انگشت خون بگیرید. برای رهنمایی خونگیری از انگشت پشت را ببینید.

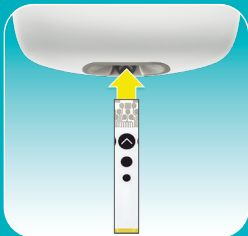

همیشه قبل از آزمایش دستهای تان را با آب گرم و صابون شسته و کاملاً خشک کنید. وقتی که باریکه را در میتر داخل می کنید، میتر روشن می شود. قسمت فلزی باریکه در میتر داخل می شود.



در ظرف کمتر از 4 ثانیه نتیجه روی صفحه ظاهر می شود. تیرک نشان می دهد که آیا نتیجه تان از محدوده هدف بالا، در داخل یا پایین قرار دارد. محدوده هدف می تواند متناسب با اهداف معالجه فردی تنظیم شود.

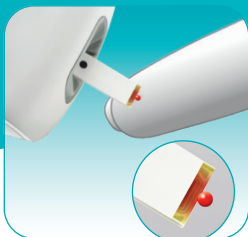

کنار زرد باریکه آزمایش را به قطره خون لمس کنید. وقتی که سمبول ساعت شنی جلوه ای روی صفحه ظاهر می شود، انگشت تان را از باریکه بردارید.



دکمه جهت یابی میتر

شاخص محدوده هدف

دکمه اخراج باریکه


قسمت باریکه



باریکه آزمایش

استفاده از آله خونگیری از انگشت FastClix

دکمه فشار

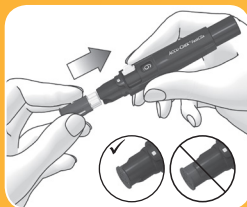

یک آله استوانه ای نیشر جدید - نخست انتهای سفید - را در آله نیشر داخل کنید.



از آله خونگیری از انگشت سرپوشی را بردارید.




قبل از گرفتن خون، دستهای تان را با آب گرم و صابون بشویید. دستهای تان را کاملاً خشک کنید.



آله نیشر را بطور محکم در محل سوراخ انتخاب شده فشار دهید. دکمه جاری کردن را پایین کنید، نیشر جاری می شود و روی پوست نفوذ می کند.



سرپوش را تا حد بچرخانید تا عمق نفوذ پذیر با شاخص تنظیم شود.

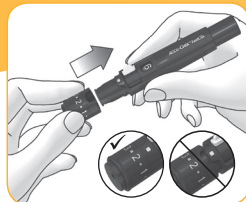

آله استوانه ای نیشر و قتیکه کاملاً در داخل آله نیشر باشد، بطور مناسب داخل شده است و فقط در نما از آله نیشر، کنار نشر بیرون می آید. سرپوش را تبدیل کنید.

بعد از گرفتن خون، به سرعت گلوکز خون تان را معاینه کنید.

هر یکی از آله استوانه ای نیشر دارای 6 نیشر می باشد

آله استوانه ای نیشر

سرپوش قابل چرخش با 11 عمق نفوذ پذیر



ACCU-CHEK INSTANT و FASTCLIX مارک های تجاری Roche Diabetes Care هستند. © 2021 Roche Diabetes Care

www.accu-chek.com | Roche Diabetes Care GmbH
| Sandhofer Straße 116 | D-68305 Mannheim