



Botón de navegación del medidor

Indicador de intervalo ideal

Botón de navegación del medidor


Botón de expulsión de la tira reactiva

Puerto para tiras reactivas



Tira reactiva

Medición de glucemia

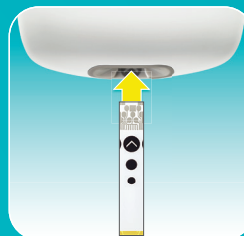

Lávese siempre las manos con agua caliente y jabón, y séquelas bien antes de iniciar la medición. El medidor de glucemia se enciende cuando se introduce la tira reactiva en el medidor. Introduzca en el medidor el extremo metálico de la tira reactiva.



Cuando aparezca el símbolo de la gota de manera intermitente, realice una punción en el dedo mediante el dispositivo de punción.

Consulte el reverso para ver las instrucciones de punción



Acerque el **borde amarillo** de la tira reactiva a la gota de sangre. Retire el dedo de la tira reactiva cuando aparezca en la pantalla el símbolo del reloj de arena de manera intermitente.



El resultado de medición aparece en la pantalla en menos de 4 segundos. La flecha muestra si el resultado de medición se encuentra por encima, por debajo o dentro del intervalo ideal de glucemia. El intervalo ideal se puede personalizar para adaptarlo a sus objetivos de terapia personales.



Botón impulsor

Cada cartucho de lancetas contiene 6 lancetas



Cartucho de lancetas

Capuchón giratorio con 11 profundidades de punción

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT y FASTCLIX son marcas registradas de Roche Diabetes Care. © 2021 Roche Diabetes Care

www.accu-chek.com | Roche Diabetes Care GmbH
| Sandhofer Straße 116 | D-68305 Mannheim

Utilización del dispositivo de punción FastClix



Lávese las manos con agua caliente y jabón antes de obtener sangre.


Séquese bien las manos.



Retire el capuchón del dispositivo de punción.



Inserte un nuevo cartucho de lancetas (por el extremo blanco) en el dispositivo de punción.

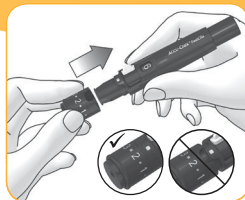

El cartucho de lancetas está bien colocado cuando está completamente dentro del dispositivo de punción y solo sobresale el reborde del dispositivo de punción en la parte delantera.

Sustituya el capuchón.



Gire el capuchón hasta que la profundidad de punción deseada se alinee con el indicador.



Presione firmemente el dispositivo de punción sobre el sitio de punción seleccionado.

Presione el botón disparador hasta el fondo para disparar la lanceta y que penetre en la piel.

Compruebe la glucemia inmediatamente después de obtener sangre.