



ናይቲ መለኮሲ መቀያየሪ በተን

ዓላማ ክልል አመለካቲ

ናይቲ መለኮሲ መቀያየሪ መልጎም


ናይቲ ስትራፕ መውግሊ በተን

ስትራፕ ፖርት



ናይ ምርመራ ስትራፕ

ምርመራ ኣብ ደም ዘሉ መጠን ግሉጥነ

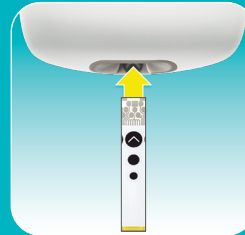


ኩሉ ግዜ ቅድሚያ ምርመራ ኢዶም ብውውይ ማይን ልምናን ተሓቢቦም ክክርቅዩ ይግባእ። እቲ መለኮሲ ዝበርህ፡ እቲ ስትራፕ ናብቲ መለኮሲ ምስ እኣተውም እዩ። እቲ ብረታዊ ጫፍ ናይቲ ስትራፕ እዩ ናብቲ መለኮሲ ዝኣተ።



ብልጭልጭ ዝብል ናይ ጠብታ ምልክት ኣብ ዝመጸሉ ግዜ፡ ኢዶም ናብቲ ደም ዝወሰድ መሳርሒ (ላንሲንግ ዲቫይስ) የፀግዑ።

ደም ከመይ ከምዝውሰድ (ላንሲንግ) ንምርእይ ብግልባጡ ይርእዩ ።

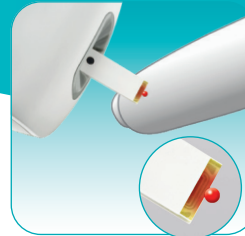

ናይቲ መለኮሲ ስትራፕ ቢጫ ጠርኪ ናብቲ ናይ ደም ጠብታ የፀግዕዎ። ብልጭልጭ ዝብል ናይ ሓደ ስዓት ምልክት ኣብቲ መርእዩ ኣብ ዝርእሉ ግዜ ኢዶም ኩብቲ መለኮሲ ስትራፕ ይፍለዩ።



ውፅኢት ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ሰከንድ ኣብቲ መርእዩ (ዲስፕላይ) ይምፅእ። እቲ ቀስቲ ውፅኢት ምርመራ ናብቲ ናይ ዓላማ ክልል ዝልዓለ፡ ማዕረ ወይ ዝተሓተ ምዃኑ የርእየና። እዚ ዓላማ ክልል ምስ ናይ ግሊ ቴራፒ ዓላማ ክነመግጥኖ ንክእል እና።



ናይ ወጥሪ በተን

ሕድ ሕድ መጥብሒ ድራም
6 ላንሲታት ይሕዝብ።



መጥንሒ ድራም

ነቲ መሸፈኒ በ ሰሪፁ ብዝላቱ
ዕምቆት አስከርርም


ACCUCHEK, ACCUCHEK INSTANT ከምኡ እውን FASTCLIX ምልክታት ንግዲ ናይ ሮፔ ምሕብላብ ሕመማት ሕማም ሽኩር እዮም። © 2021 ናይ ሮፔ ምሕብላብ ሕመማት ሕማም ሽኩር

www.accu-chek.com | Roche Diabetes Care GmbH
| Sandhofer Straße 116 | D-68305 Mannheim


ናይ ፋስትክሊክስ ደም ዝወስድ መሳርሒ (ላንሲንግ ዲቪይስ) ብምጥቃም




ቅድሚያ ደም ምውሳዶም፡ ኢዶም ብወ-ዑይ ማይን ሳምናን ይትሓፀቡ።
ኢዶም ብድምቢ የድርቕም።

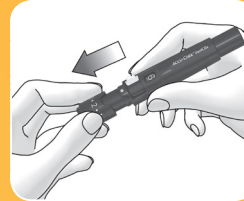

እቲ መሸፈኒ ካብቲ ደም ዝወስድ መሳርሒ ይለሊይዎ።

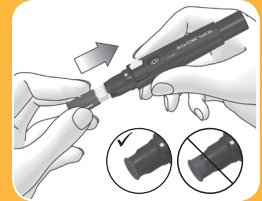

ኣድሽ መጥብሒ ድራም የለትዉ፡ መጀመርያ እቲ ፃዕዳ ጫፍ ናብቲ ደም ዝወስድ መሳርሒ የለትዉ።

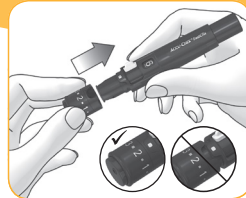

እቲ መጥብሒ ድራም ምሉእ ብምሉእ እብ ውሽጢ ደም ዝወስድ መሳርሒ (ላንሲንግ ዲቪይስ) እንትጥቀሙ፡ ብድምቢ ኣትዩ ኣሎ ማለት እዩ።

እቲ መሸፈኒ ብካሊ እ ይተክለዎ።



ክሳብ ዝድለ ዕምቆት ምስቲ አመላካቲ ማዕረግ ዝሽውን፡ እቲ መሸፈኒ ዘውርዎ።



እብቲ ዝተመረፀ ናይ ፓንክቸር ቦታ እቲ ደም ዝወስድ መሳርሒ (ላንሲንግ ዲቪይስ) ቀስ ኣቢሎም ይጠውቅዎ።

እቲ ናይ መስደዳ መልንም ክሳብ ታሕቲ ምስ ጠውቅዎ እቲ መጥብሒ ተሰዲዱ ኣሎ ማለት እዩ፤ ስለዚ ቁርበትና ሰንጠቄ ይኣቱ።

ደፍም ምስወሰዱ፡ ቀጥታ ኣብ ደፍም ዘሎ መጠን ግልኮዝ ይለከዑ።