



Ölçüm cihazı navigasyon düğmesi

Hedef aralık göstergesi

Ölçüm cihazı navigasyon düğmesi

Ölçüm çubuğu ejektörü

Ölçüm çubuğu giriş yeri



Ölçüm çubuğu


Kan şekeri ölçümü



Ölçüm yapmaya başlamadan önce daima ellerinizi ılık sabunlu su ile yıkayın ve iyice kurulaın. Ölçüm cihazına ölçüm çubuğunu taktığınızda ölçüm cihazı açılır. Ölçüm çubuğunun metal ucu ölçüm cihazına girer.



Yanıp sönen bir damla sembolü görüldüğünde parmak delme cihazı ile parmağınızı delin. Parmak delme talimatları için arka sayfaya bakın.

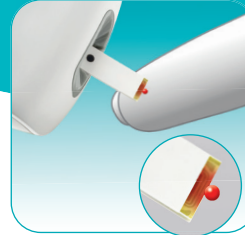

Ölçüm çubuğunun **sarı ucunu** kan damlasına dokundurun. Ekranda yanıp sönen kum saati sembolü görüldüğünde parmağınızı ölçüm çubuğundan kaldırın.



4 saniyeden kısa bir sürede ölçüm sonucu ekranda görüntülenir. Ok, ölçüm sonucunuzun hedef aralığın üstünde, içinde ya da altında olduğunu gösterir. Hedef aralık, kişisel tedavi hedeflerinize uygun olacak şekilde kişiselleştirilebilir.



Basma düğmesi

Her lanset tamburunda
6 lanset vardır



Lanset tamburu

11 derinlik ayarına sahip
döndürülebilir kapak


ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT ve FASTCLIX, Roche Diabetes Care markalarıdır. © 2021 Roche Diabetes Care

www.accu-chek.com | Roche Diabetes Care GmbH
| Sandhofer Straße 116 | D-68305 Mannheim


FastClix parmak delme cihazının kullanımı




Kan almadan önce ellerinizi
sıcak su ve sabun ile yıkayın.
Ellerinizi iyice kurulayın.

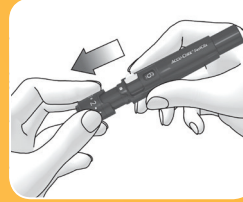

Parmak delme cihazının
kapağını çıkarın.

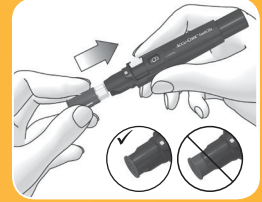


Yeni lanset tamburunu beyaz
uç önde olacak şekilde
parmak delme cihazına takın.

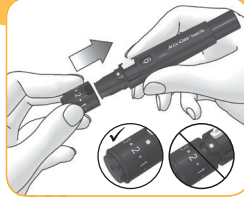

Lanset tamburu, tamamen
parmak delme cihazının
içine girdiğinde doğru şekilde
yerleştirilmiş olur ve sadece
çıkıntılı olan kenar, parmak
delme cihazının ön kısmından
dışarı çıkar.

Kapağı tekrar takın.

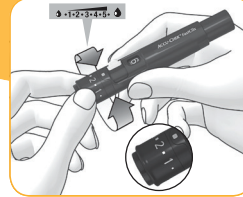

İstenen derinlik ayarını
göstergeyle aynı hizaya gelene
kadar kapağı döndürün.



Parmak delme cihazını seçilen
kan alma yerine sıkıca bastırın.
Tetik tuşunun sonuna kadar
basın, lanset serbest kalır ve
cildi deler.

Kan şekerinizi, kan aldıktan
hemen sonra ölçün.