



Börja här

Kom igång-guide



⚠ VARNING

Den här kom igång-guiden ersätter inte bruksanvisningen till din Accu-Chek Instant-blodsockermätare. Bruksanvisningen innehåller viktiga hanteringsanvisningar och ytterligare information.




⚠ VARNING

Blodprovstagaren är endast avsedd för personligt bruk.

ACCU-CHEK®

Översikt över mätaren

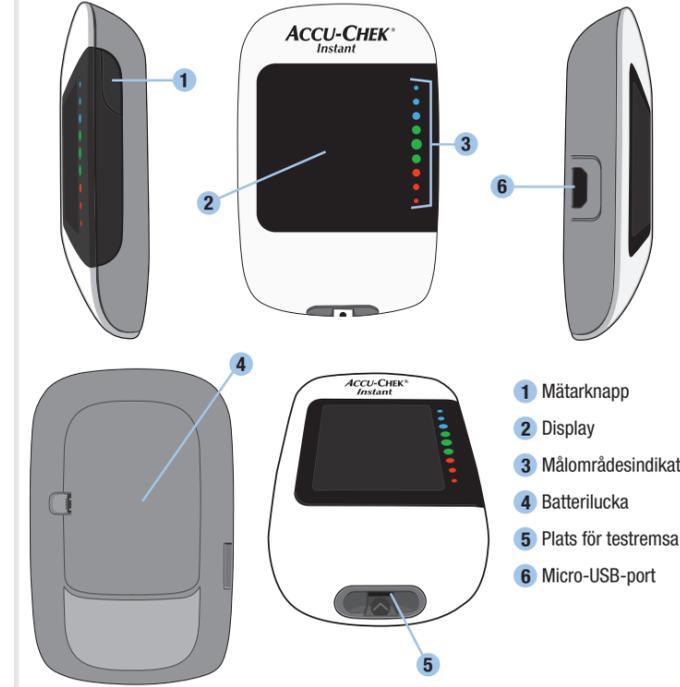


- 1 Mätarknapp
- 2 Display
- 3 Målområdesindikator
- 4 Batterilucka
- 5 Plats för testremsa
- 6 Micro-USB-port

Förbereda blodprovstagaren



1 Avtryckare
Insticksdjup
Kåpa
Indikator för återstående lansetter
Spak för att förbereda en ny lansett


Bekanta dig med Accu-Chek FastClix-blodprovstagaren.

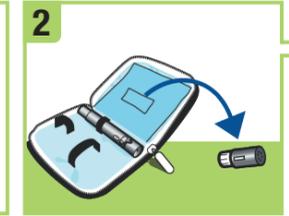

2 Ta ut lansettrumman ur väskans ficka.




3 1 lansettrumma = 6 lansetter
ANMÄRKNING Varje lansettrumma innehåller 6 sterila lansetter.

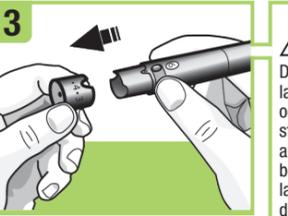

4 Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.



5 Skjut in lansettrumman i blodprovstagaren med den vita änden först. Tryck lansettrumman ända in i blodprovstagaren tills den klickar på plats.

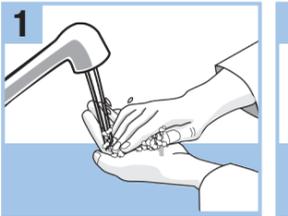


6 Ställ in önskat insticksdjup. Börja med 2. Om du har tjockare hud, ska du välja ett större insticksdjup.




7 Använda blodprovstagaren: När du trycker på avtryckaren laddas och utlöses blodprovstagaren med endast 1 klick.

Utföra ett blodsockertest

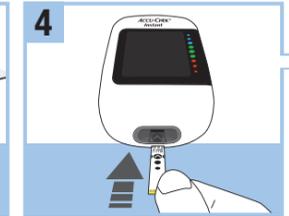


1 Tvätta händerna med tvål och varmt vatten och torka dem noggrant.

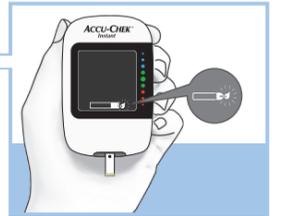

2 Kontrollera utgångsdatumet på testremsburken. Använd inte testremsor med passerat utgångsdatum.



3 Ta ut en testremsa ur testremsburken. Förslut testremsburken väl.

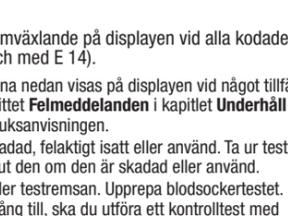


4 Sätt in testremsans metallfärgade ände i mätaren. Mätaren slås på. En blinkande droppsymbol visas.



5 Tryck blodprovstagaren hårt mot sidan av fingertoppen och tryck på avtryckaren för att sticka dig i fingret.



6 För testremsans gula ände till bloddroppen. Ta bort fingret från testremsan när den blinkande timglassymbolen visas. Applicera inte blod ovanpå testremsan.

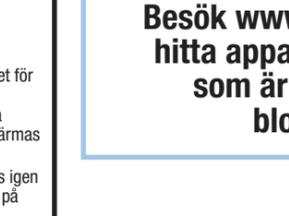

7 Testresultatet visas på displayen efter mindre än 4 sekunder.



8 Förbered blodprovstagaren för nästa test. Skjut spaken så långt det går och tillbaka igen för att förbereda en ny lansett. Indikatorn visar antalet återstående lansetter.

Felmeddelanden

ANMÄRKNING

Felkoden och Err blinkar omväxlande på displayen vid alla kodade felmeddelanden (E-1 till och med E 14).

Om något av felmeddelandena nedan visas på displayen vid något tillfälle, ska du omgående läsa avsnittet **Felmeddelanden** i kapitlet **Underhåll och felsökning av mätaren** i bruksanvisningen.

E-1 Testremsan kan vara skadad, felaktigt isatt eller använd. Ta ur testremsan och sätt i den igen eller byt ut den om den är skadad eller använd.

E-3 Det är fel på mätaren eller testremsan. Upprepa blodsockertestet. Om E-3-felkoden visas en gång till, ska du utföra ett kontrolltest med kontrolllösning och en ny testremsa.

• Om kontrollresultatet ligger inom godkänt område, ska du kontrollera att du följde stegen i testproceduren och upprepa blodsockertestet med en ny testremsa.

• Om kontrollresultatet ligger utanför godkänt område, ska du läsa avsnittet **Tolka kontrollresultat som ligger utanför godkänt område** i kapitlet **Kontrolltest** i bruksanvisningen.

Det här felet kan visas om testremsburken inte har varit väl försluten. Testremsorna kan ha skadats på grund av felaktig lagring eller hantering.

I sällsynta fall kan E-3-felkoden indikera att ditt blodsockerresultat är extremt högt och ligger över systemets mätintervall. Om det inte känns som om ditt blodsocker är extremt högt, ska du upprepa blodsockertestet. Läs avsnittet **Ovanliga blodsockerresultat** i kapitlet **Blodsockertest** i bruksanvisningen. Om E-3-felkoden visas igen efter blodsockertestet, ska du **kontakta läkaren/ diabetesteamet omgående**.

E-4 Testremsan har inte sugit upp tillräckligt med blod eller kontrolllösning för ett test, eller också tillfördes droppen efter att testet hade startat. Kassera testremsan och upprepa blodsocker- eller kontrolltestet.

E-6 Blod eller kontrolllösning tillfördes till testremsan innan den blinkande droppsymbolen visades på displayen. Kassera testremsan och upprepa blodsocker- eller kontrolltestet.

E-7 Ett elektroniskt fel uppstod. Ta ur batterierna, tryck på och håll ned mätarknappen i minst 2 sekunder och sätt i batterierna igen. Utför ett blodsocker- eller kontrolltest.

E-8 Temperaturen ligger över eller under det korrekta temperaturområdet för systemet. Mer information om systemets användningsvillkor finns i bipacksedeln till testremsorna. Flytta dig till ett område med de lämpliga villkoren och upprepa blodsocker- eller kontrolltestet. Mätaren får inte värmas upp eller kylas ned på konstgjord väg.

E-9 Batterierna är nästan slut. Byt batterierna nu. Om meddelandet visas igen efter att du har bytt batterierna, ska du ta ur batterierna igen och trycka på och hålla ned mätarknappen i minst 2 sekunder och därefter sätta i batterierna igen.

E 10 Den inbyggda klockan i mätaren kan behöva ställas om. Tryck på mätarknappen. Om tid och datum hade ställts in tidigare, måste du ställa in dem på nytt. Läs avsnittet **Tid och datum** i kapitlet **Ditt nya system** i bruksanvisningen.

E 11 Testremsan kan vara skadad. Upprepa blodsocker- eller kontrolltestet med en ny testremsa.

E 12 Blodprovet kan innehålla en hög halt av askorbinsyra. Kontakta läkaren/ diabetesteamet.

E 13 Det kan finnas vätska eller främmande material i platsen för testremsan. Ta ur testremsan och sätt i den igen eller upprepa blodsocker- eller kontrolltestet med en ny testremsa. Kontakta Roche om felet kvarstår.

E 14 Ett elektroniskt fel uppstod. Kontakta Roche.

ANMÄRKNING

Kontakta Roche om felmeddelandet fortsätter att visas.

Besök www.accu-chek.com för att hitta appar för diabeteshantering som är kompatibla med din blodsockermätare.

SENASTE REVIDERING: 2018-03

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT och SOFTCLIX är varumärken som tillhör Roche.

© 2018 Roche Diabetes Care
08045046001(02)-0518

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.

Roche USA – 76340
V4/1 – 08045046001(02) – Black

Roche USA – 76340
V4/2 – 08045046001(02) – Cyan

Roche USA – 76340
V4/3 – 08045046001(02) – Magenta

Roche USA – 76340
V4/4 – 08045046001(02) – Yellow

Approved according to SOP.04.02.GPL.0004 **Production**
The Signature will not be printed!

LAN RAYERJ - May 17, 2018

IPM SUTTONA2 - May 21, 2018

PM/LAB SMITHK44 - May 22, 2018

GD/LAY CURTISD6 - May 23, 2018

