



Botão de navegação do aparelho de medição da glicemia

Indicador do intervalo-alvo

Botão de navegação do aparelho de medição da glicemia


Ejetor da tira-teste

Porta de tiras-teste



Tira-teste

Testes de glicemia

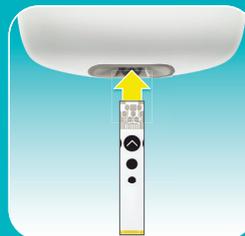

Lave sempre as mãos com água morna com sabão e seque-as minuciosamente antes de iniciar um teste. O aparelho de medição da glicemia liga-se quando a tira-teste é inserida no aparelho de medição. A extremidade metálica da tira-teste entra no aparelho de medição da glicemia.



Quando aparecer um símbolo de uma gota a piscar, faça uma picada no dedo com o dispositivo de punição.

Consulte o verso para instruções de punição.



Toque na **ponta amarela** da tira-teste para a gota de sangue. Retire o dedo da tira-teste quando o símbolo da ampulheta a piscar aparecer no visor.



O resultado de teste aparece no visor em menos de 4 segundos. A seta mostra se o resultado de teste está acima, dentro, ou abaixo do intervalo-alvo de glicemia. O intervalo-alvo de glicemia pode ser individualizado para se adequar aos seus objetivos de terapia pessoal.



Botão de tensão

Cada cartucho de lancetas contém 6 lancetas



Cartucho de lancetas

Tampa rotativa com 11 profundidades de penetração

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT e FASTCLIX são marcas comerciais da Roche Diabetes Care. © 2021 Roche Diabetes Care

www.accu-chek.com | Roche Diabetes Care GmbH
| Sandhofer Straße 116 | D-68305 Mannheim

Utilização do dispositivo de punção FastClix




Lave as mãos com água morna e sabão antes de colher sangue. Seque as mãos minuciosamente.



Retire a tampa do dispositivo de punção.



Insira o novo cartucho de lancetas — extremidade branca primeiro — no dispositivo de punção.

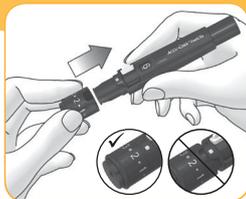

O cartucho de lancetas fica inserido de forma adequada quando fica totalmente dentro do dispositivo de punção, e só a ponta de ejeção fica para fora do dispositivo de punção na parte da frente. Substitua a tampa.



Rode a tampa até a profundidade de penetração pretendida ficar alinhada com o indicador.



Prima o dispositivo de punção com firmeza contra o local de punção escolhido. Prima o botão de disparo totalmente para baixo, a lanceta é libertada e penetra a pele. Teste a sua glicemia imediatamente depois de ter colhido sangue.