


Observera! Denna förkortade snabbguiden ersätter inte produktens bruksanvisning.




Postavljajte lancetara




Upoznajte se s lancetarom Accu-Chek Softclix.

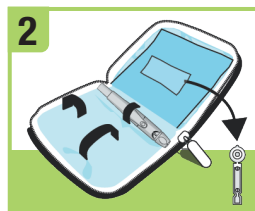


Izvadite lancetu iz pretinca u torbici.

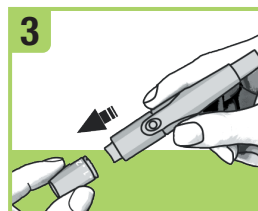


Skinite kapicu s lancetara tako što ćete ju povući ravno prema gore. Kapicu na lancetaru nemojte zakretati.

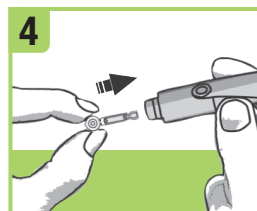

Umetnite lancetu u lancetar dok ne sjedne na mjesto.

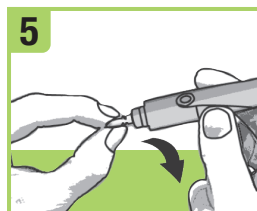


Skinite zaštitnu kapicu s lancete.

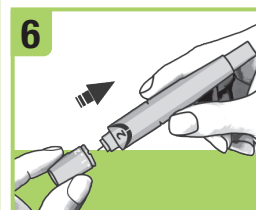

Vratite kapicu na lancetar. Zarez na kapici mora biti poravnan sa zarezom na lancetaru.



Postavite ugodnu dubinu uboda na lancetaru. Počnite s dubinom 2. Za deblju kožu odaberite veći broj.

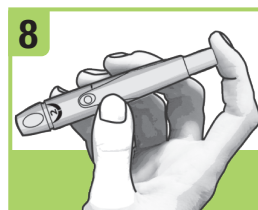


Pritisnite tipku za zapinjanje do kraja, kao kemijsku olovku. Ne pritišćete tipku za zapinjanje. Kada je lancetar spreman za rad, tipka za okidanje će požutjeti.



Odložite lancetar u stranu dok ne budete spremni ubosti prst.

Provođenje mjerenja glukoze u krvi

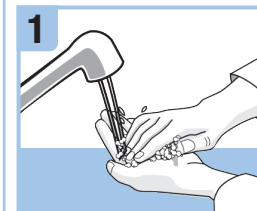


Prije nego izvedete mjerenje glukoze u krvi, operite i osušite ruke.




Provjerite rok valjanosti na kutiji test traka. Ne koristite test trake kojima je istekao rok valjanosti.




Izvadite test traku iz kutije test traka. Čvrsto zatvorite kapicu.

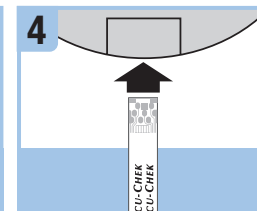

Umetnite metalni kraj test trake u aparat za mjerenje glukoze u krvi.

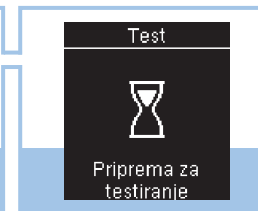



Aparat se uključuje. Pojavljuje se **Priprema za testiranje**.

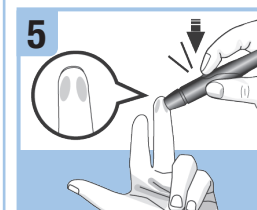

Snažno pritisnite lancetar na bočnoj strani jagodice prsta i pritisnite žutu tipku za okidanje kako biste uboli prst.



Dotaknite kapljicu krvi **žutim rubom** test trake. Uklonite prst s test trake kad se pojavi **Analiziranje**. Nemojte stavljati kapljicu krvi na vrh test trake.

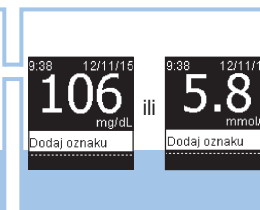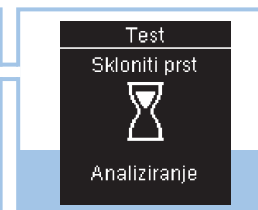

Rezultat mjerenja pojavljuje se na zaslonu za manje od 4 sekunde.



Skinite kapicu lancetara. Usmjerite lancetu od sebe. Izvucite potisni klip kako biste okinuli lancetu.