


### Подготовка устройства для прокалывания кожи

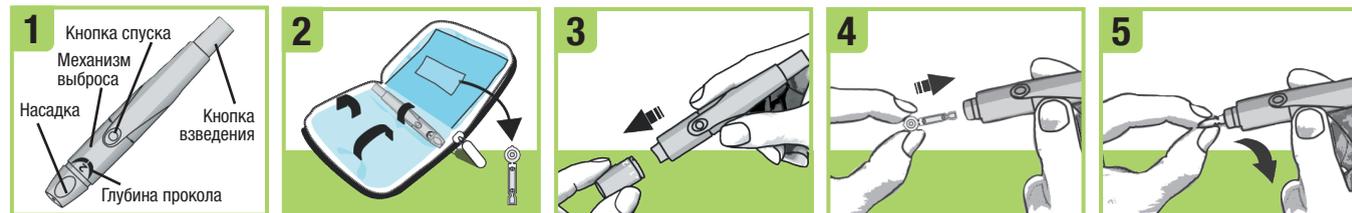


1. Кнопка спуска  
Механизм выброса  
Насадка  
Кнопка взведения  
Глубина прокола

2. Возьмите ланцет из кармана чехла.

3. Снимите насадку, потянув за нее. Не вращайте насадку.

4. Вставьте ланцет в устройство для прокалывания кожи до щелчка.

5. Открутите предохранительный колпачок ланцета.

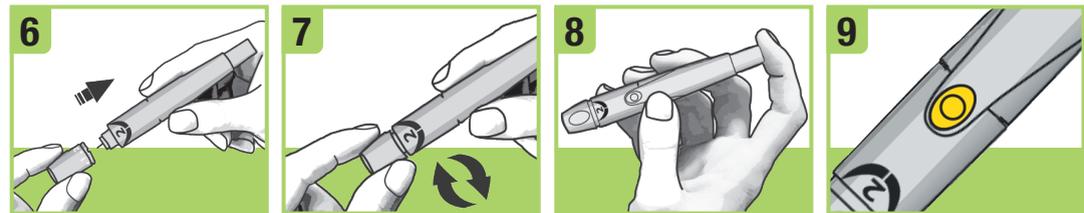

6. Оденьте насадку на устройство для прокалывания кожи. Убедитесь в том, что выемка на насадке совпадает с выемкой на устройстве для прокалывания кожи.

7. Настройте глубину прокола ланцета на комфортный уровень. Начните со 2-го уровня. Для толстой кожи установите большее значение.

8. До конца нажмите кнопку взведения (как на пишущей ручке). Не нажимайте на кнопку спуска при нажатой кнопке взведения. Когда устройство для прокалывания кожи будет готово, кнопка спуска станет желтой.

9. Отложите устройство для прокалывания кожи до того момента, когда вы будете готовы выполнить прокол пальца.

### Выполнение измерения уровня глюкозы крови




1. Перед выполнением измерения уровня глюкозы крови вымойте и высушите руки.

2. Проверьте срок годности, указанный на тубусе с тест-полосками. Не используйте тест-полоски с истекшим сроком годности.

3. Извлеките тест-полоску из тубуса с тест-полосками. Плотно закройте крышку тубуса.

4. Вставьте металлический конец тест-полоски в глюкометр.

Глюкометр включится. Появится надпись **Подготовка к измерению...**

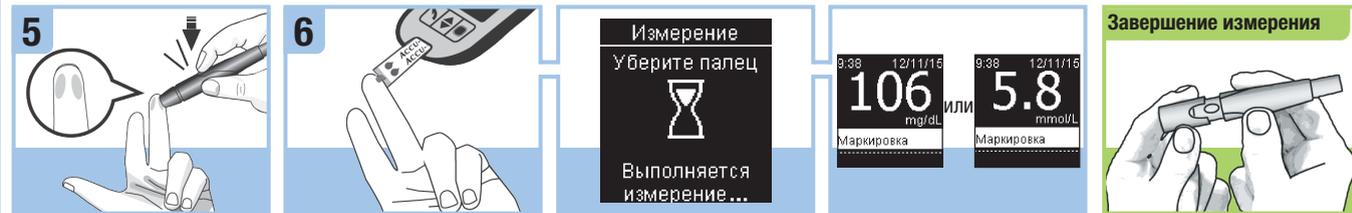

5. Плотно прижмите устройство для прокалывания кожи к боковой стороне кончика пальца и нажмите желтую кнопку спуска, чтобы сделать прокол.

6. Прикоснитесь **желтым краем** тест-полоски к капле крови. Уберите палец, когда появится надпись **Выполняется измерение...** Не наносите кровь на верхнюю часть тест-полоски.

Результат измерения отобразится на дисплее менее чем через 4 секунды.

Завершение измерения  
Снимите насадку устройства для прокалывания кожи. Направьте ланцет от себя. Выдвиньте механизм выброса вперед, чтобы удалить ланцет.