





Start her

Kort vejledning

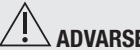

ADVARSEL

Denne korte vejledning erstatter ikke brugsanvisningen til dit Accu-Chek Instant blodsukkerapparat. Brugsanvisningen indeholder vigtige håndteringsanvisninger og nærmere oplysninger.

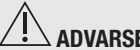


ADVARSEL

Fingerprikkeren er kun beregnet til personlig brug.


ACCU-CHEK®

Øversigt over apparatet

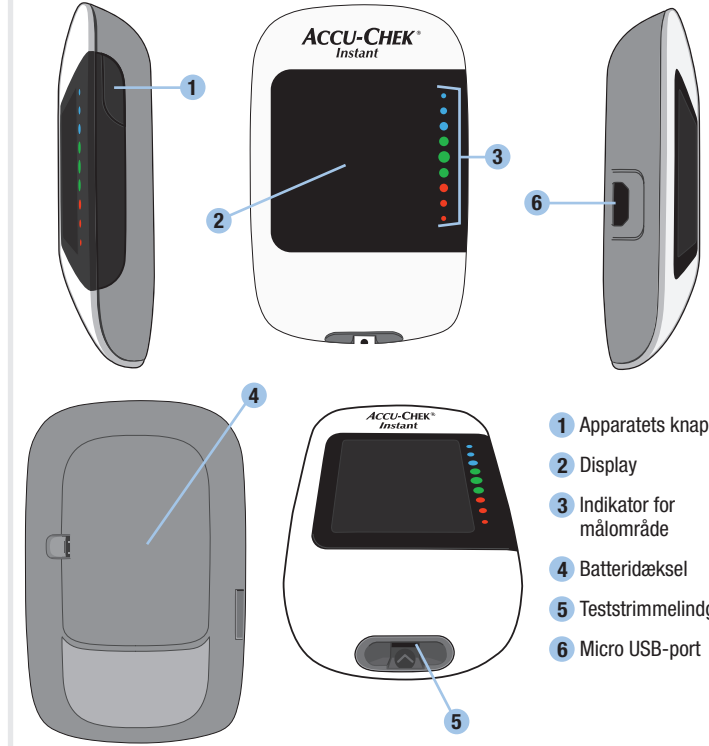


- 1 Apparats knap
- 2 Display
- 3 Indikator for målområde
- 4 Batteridæksel
- 5 Teststrimmelindgang
- 6 Micro USB-port


Klargøring af fingerprikkeren

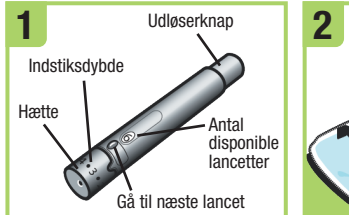


Gør dig bekendt med Accu-Chek FastClix-fingerprikkeren.

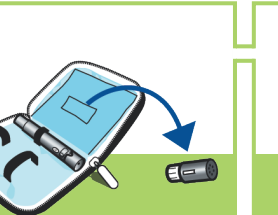

Tag lancetromlen ud af etuiets lomme.

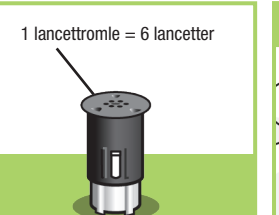


BEMÆRK
Hver lancetromle indeholder 6 sterile lancetter.

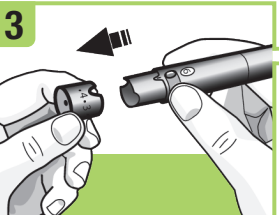


Isæt lancetromlen i fingerprikkeren med den hvide ende forrest. Skub lancetromlen helt ind, indtil den klikker på plads.



BEMÆRK
Fjern ikke lancetromlen, før alle 6 lancetter er opbrugt, da lancetromlen ikke kan genbruges, hvis den har været taget ud af fingerprikkeren.

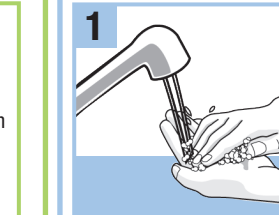


Sæt hættten på fingerprikkeren igen. Sørg for, at positioneringshakket i hættten og forhøjningen på fingerprikkeren griber ind i hinanden.

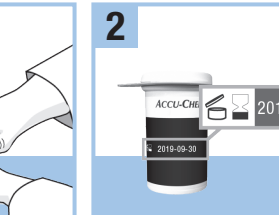


Sådan bruges fingerprikkeren: Tryk på udløserknappen; fingerprikkeren lades og udløses med kun 1 klik.


Udførelse af en blodsuktermåling

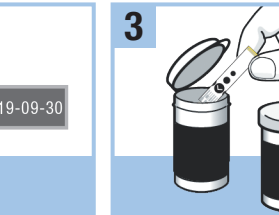


Vask hænderne med varmt vand og sæbe, og tør dem derefter grundigt.

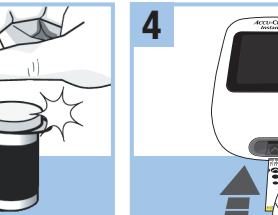

Kontrollér udløbsdatoen på teststrimmelbeholderen. Anvend ikke teststriklerne, hvis udløbsdatoen er overskredet.

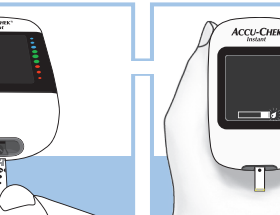


Tag en teststrimmel ud af teststrimmelbeholderen. Luk teststrimmelbeholderen forsvarligt.

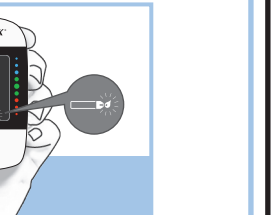


Før den metalliske ende af teststrimlen ind i apparatet. Apparatet tændes.




Et blinkende dråbesymbol vises.

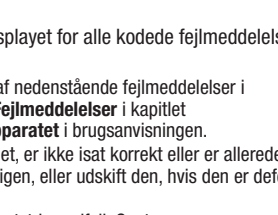


Tryk fingerprikkeren fast mod siden af din fingerspids, og tryk på udløserknappen for at give dig selv et prik i fingeren.

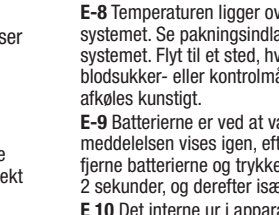

Lad teststrimlens gule kant berøre blodråben. Fjern fingeren fra teststrimlen, når det blinkende timeglassymbol vises. Blodet skal ikke lægges oven på teststrimlen.

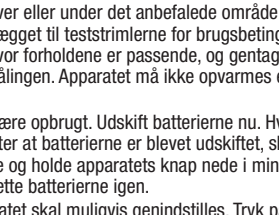

Måleresultatet vises i displayet efter mindre end 4 sekunder.

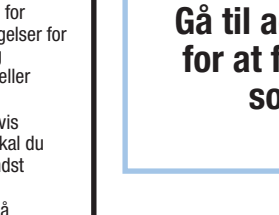

skal du klargøre fingerprikkeren til næste måling. Drej skyderen frem og tilbage én gang for at gå til den næste lancet. Indikatoren viser antallet af disponible lancetter.

Fejlmeddelelser

BEMÆRK
Fejlkode og Err vises skiftevis i displayet for alle kodede fejlmeddelelser (E-1 til E 14).

Hvis der på noget tidspunkt vises en af nedenstående fejlmeddelelser i displayet, skal du straks se afsnittet **Fejlmeddelelser** i kapitlet **Vedligeholdelse og fejlfinding af apparatet** i brugsanvisningen.

E-1 Teststrimlen er muligvis beskadiget, er ikke isat korrekt eller er allerede brugt. Fjern teststrimlen, og isæt den igen, eller udskift den, hvis den er defekt eller allerede brugt.

E-2 Der er opstået en apparat- eller teststrimmel fejl. Gentag blodsuktermålingen. Hvis endnu en E-3-fejlmeddelelse vises, skal du udføre en kontrolmåling med kontrolvæske og en ny teststrimmel.

E-3 Hvis kontrolresultatet ligger inden for det acceptable område, skal du kontrollere fremgangsmåden for målingen og gentage blodsuktermålingen med en ny teststrimmel.

E-4 Hvis kontrolresultatet ikke ligger inden for det acceptable område, skal du se afsnittet **Fortolkning af kontrolresultater, der ligger uden for det acceptable område** i kapitlet **Kontrolmålinger** i brugsanvisningen.

I sjældne tilfælde kan en E-3-fejlmeddelelse indikere, at dit blodsukkerresultat muligvis er ekstremt højt og ligger over systemets måleinterval. Hvis det ikke føles, som om dit blodsukker er ekstremt højt, skal du gentage blodsuktermålingen. Se afsnittet **Unormale blodsukkerresultater** i kapitlet **Blodsuktermålinger** i brugsanvisningen. Hvis E-3-fejlmeddelelsen vises igen efter blodsuktermålingen, skal du straks kontakte din diabetesbehandler.

E-4 Der blev ikke suget tilstrækkeligt blod eller kontrolvæske ind i teststrimlen til at udføre en måling, eller dråben blev tilført, efter at målingen var startet. Kassér teststrimlen, og gentag blodsukker- eller kontrolmålingen.

E-5 Teststrimlen blev tilført blod eller kontrolvæske, inden det blinkende dråbesymbol blev vist. Kassér teststrimlen, og gentag blodsukker- eller kontrolmålingen.

E-6 Der opstod en elektronisk fejl. Fjern batterierne, tryk og hold apparatets knap nede i mindst 2 sekunder, og isæt batterierne igen. Udfør en blodsukker- eller kontrolmåling.

E-7 Temperaturen ligger over eller under det anbefalede område for systemet. Se pakningsindlægget til teststriklerne for brugsbetingelser for systemet. Flyt til et sted, hvor forholdene er passende, og gentag blodsukker- eller kontrolmålingen. Apparatet må ikke opvarmes eller afkøles kunstigt.

E-8 Batterierne er ved at være opbrugt. Udskift batterierne nu. Hvis meddelelsen vises igen, efter at batterierne er blevet udskiftet, skal du fjerne batterierne og trykke og holde apparatets knap nede i mindst 2 sekunder, og derefter isætte batterierne igen.

E-9 Det interne ur i apparatet skal muligvis genindstilles. Tryk på apparatets knap. Hvis klokkeslæt og dato var indstillet på apparatet, skal du genindstille dem. Se afsnittet **Klokkeslæt og dato** i kapitlet **Dit nye system** i brugsanvisningen.

E-10 Teststrimlen er muligvis beskadiget. Gentag blodsukker- eller kontrolmålingen med en ny teststrimmel.

E-11 Din blodprøve indeholder muligvis en høj mængde askorbat. Kontakt din diabetesbehandler.

E-12 Væske eller fremmedlegemer kan være trængt ind i teststrimmelindgangen. Fjern og isæt teststrimlen igen, eller gentag blodsukker- eller kontrolmålingen med en ny teststrimmel. Kontakt Roche, hvis fejlen fortsætter.

E-13 Der er opstået en elektronisk fejl. Kontakt Roche.

Gå til adressen www.accu-chek.com for at finde apps til diabeteskontrol, som er kompatible med dit blodsukkerapparat.

SENESTE OPDATERING: 2017-10

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Approved according to SOP.04.07.GPL.0004	Production
The Signature will not be printed!	
LAN	DWORATZK - Jan 10, 2018
IPM	HALLA5 - Jan 10, 2018
PM/LAB	SMITHK44 - Jan 17, 2018
GD/LAY	WILKINP3 - Jan 17, 2018

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT og FASTCLIX er varemærker tilhørende Roche.

© 2018 Roche Diabetes Care
08045097001(01)-0118