




## انجام تست قند خون

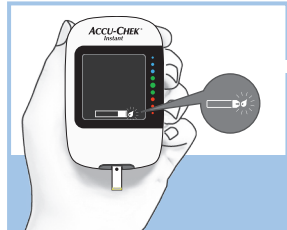


یک نماد چشمک زن قطره ظاهر می شود.

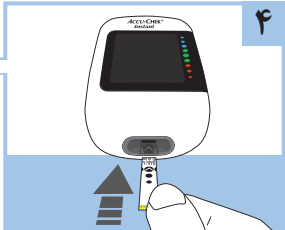


انتهای فلزی نوار تست را در دستگاه اندازه گیری قرار دهید. دستگاه اندازه گیری روشن می شود.

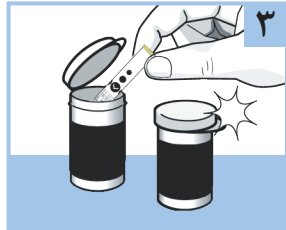

نوار تستی را از ظرف نوار تست بردارید. درب آن را محکم ببندید.

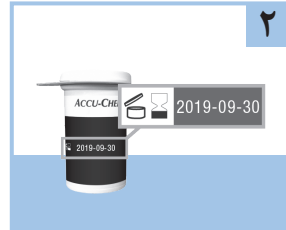


حتما تاریخ مصرف ظرف نوار تست را بررسی کنید. هرگز از نوارهای تست تاریخ گذشته استفاده نکنید.

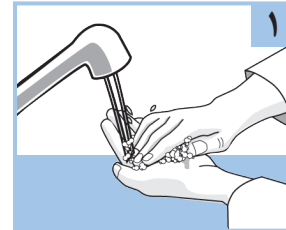


دستان خود را با آب گرم و صابون بشویید و کاملا خشک کنید.




قبل از پایان کار...  
1. نوار تست را از بسته خارج کنید.  
2. نوار تست را در دستگاه قرار دهید.

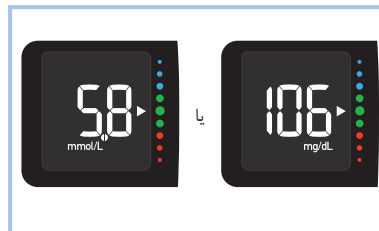

نتیجه تست در کمتر از ۴ ثانیه، بر روی نمایشگر نشان داده می شود.

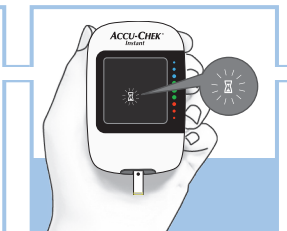


لبه زرد نوار تست را با قطره خون آغشته کنید. در هنگام ظاهر شدن نماد چشمک زن ساعت شنی، انگشت خود را از روی نوار تست بردارید. هرگز خون را بر قسمت بالای نوار تست نزنید.

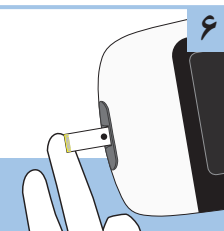


اتولانست را محکم در کنار سرانگشت خود فشار دهید و دکمه رها کردن را برای ایجاد یک خراش کوچک بر روی انگشتان، فشار دهید.



استفاده از اتولانست: با فشار دادن دکمه رها کننده، اتولانست آماده شده و با ۱ کلیک خراش کوچکی ایجاد خواهد کرد.

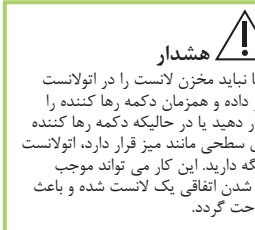


**هشدار**  
شما نباید مخزن لانست را در اتولانست قرار داده و همزمان دکمه رها کننده را فشار دهید یا در حالیکه دکمه رها کننده روی سطحی مانند میز قرار دارد، اتولانست را نگه دارید. این کار می تواند موجب رها شدن اتفاقی یک لانست شده و باعث جراحت گردد.

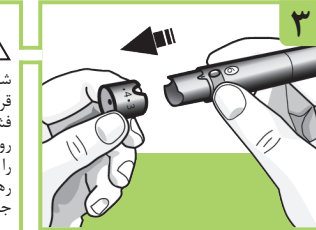


کلاهک بالایی را با کشیدن آن به بیرون، در آورید. کلاهک را نچرخانید.



نکته  
هر مخزن لانست محتوی ۶ لانست استریل است.

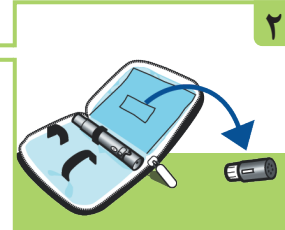


یک مخزن لانست از جیب موجود در کیف بردارید.

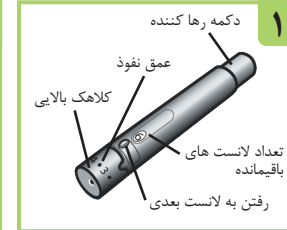


با اتولانست Accu-Chek FastClix (آکیوچک فست کلیکس) آشنا شوید.



هرگاه آماده تست بودید...  
مطمئن شوید که حتما شکاف کلاهک با شکاف اتولانست هم تراز شود و در یک خط باشد.

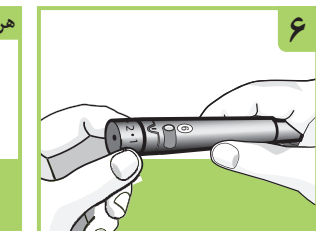


عمق لانست را برای سطح نفوذ راحت تنظیم کنید. از شماره 2 شروع کنید. برای پوست های ضخیم تر، از شماره ۱ بالاتری شروع کنید.

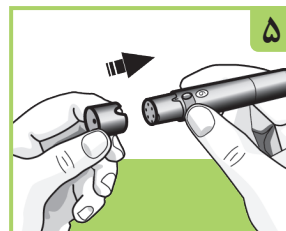

کلاهک را دوباره به اتولانست متصل کنید. اگر هنوز تمام ۶ لانست مصرف نشده اند نباید مخزن لانست را بردارید چون به محض اینکه مخزن لانست را از اتولانست بردارید دیگر قابل استفاده مجدد نخواهد بود.



نکته  
مخزن لانست را از انتهای سفید آن وارد اتولانست کنید. مخزن لانست را تا آخر به جلو فشار دهید تا با صدای کلیک در جای خود محکم شود.

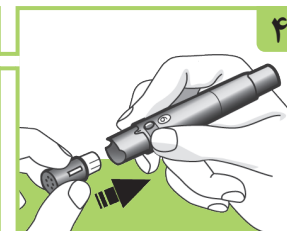

مخزن لانست را از انتهای سفید آن وارد اتولانست کنید. مخزن لانست را تا آخر به جلو فشار دهید تا با صدای کلیک در جای خود محکم شود.