



Observera! Denna förkortade snabbguiden ersätter inte produktens bruksanvisning.


Förbereda blodprovstagaren

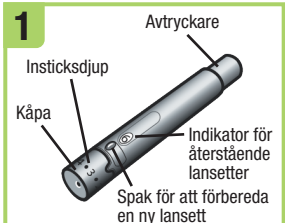


Bekanta dig med Accu-Chek FastClix-blodprovstagaren.

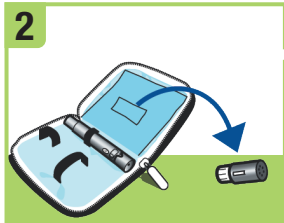



Ta ut lansettrumman ur väskans ficka.

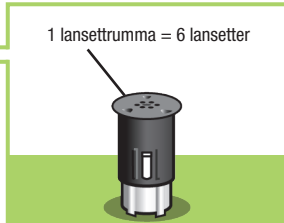

ANMÄRKNING
Varje lansettrumma innehåller 6 sterila lansetter.

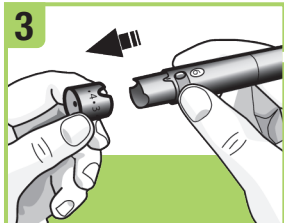


Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.

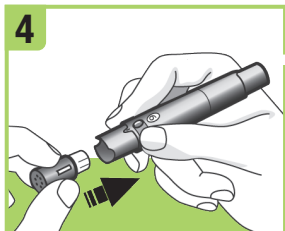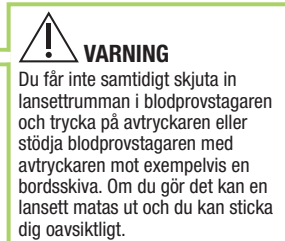


Skjut in lansettrumman i blodprovstagaren med den vita änden först. Tryck lansettrumman ända in i blodprovstagaren tills den klickar på plats.



ANMÄRKNING
Ta inte ut lansettrumman förrän du har använt alla 6 lansetterna eftersom du inte kan återanvända lansettrumman om du en gång har tagit ut den ur blodprovstagaren.

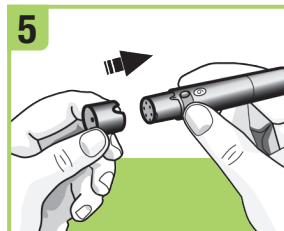

Sätt tillbaka kåpan på blodprovstagaren. Kontrollera att den utskurna delen på kåpan justeras mot den upphöjda konturen på blodprovstagaren.

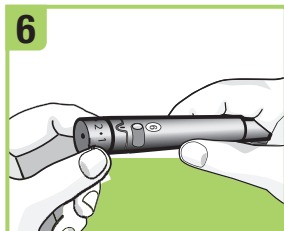


Ställ in önskat insticksdjup. Börja med 2. Om du har tjockare hud, ska du välja ett större insticksdjup.



När du är redo att börja testa...

Använda blodprovstagaren: När du trycker på avtryckaren laddas och utlöses blodprovstagaren med endast 1 klick.

Utföra ett blodsockertest

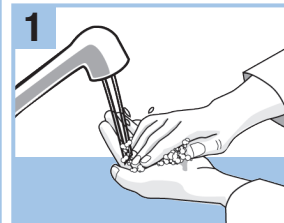


Tvätta händerna med tvål och varmt vatten och torka dem noggrant.




Kontrollera utgångsdatumet på testremseburken. Använd inte testremсор med passerat utgångsdatum.




Ta ut en testremsa ur testremseburken. Förslut testremseburken väl.

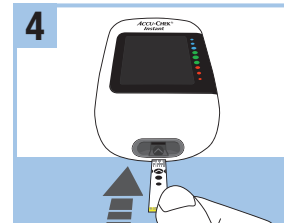


Sätt in testremsans metallfärgade ände i mätaren. Mätaren slås på.

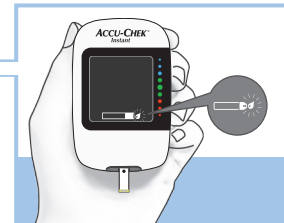


En blinkande droppsymbol visas.

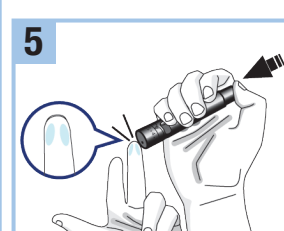

Tryck blodprovstagaren hårt mot sidan av fingertoppen och tryck på avtryckaren för att sticka dig i fingret.

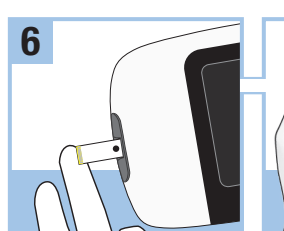

För testremsans gula ände till bloddroppen. Ta bort fingret från testremsan när den blinkande timglassymbolen visas. Applicera inte blod ovanpå testremsan.

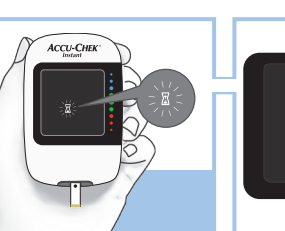

Testresultatet visas på displayen efter mindre än 4 sekunder.



Innan du avslutar...

Förbered blodprovstagaren för nästa test. Skjut spaken så långt det går och tillbaka igen för att förbereda en ny lansett. Indikatorn visar antalet återstående lansetter.