



Parmak delme cihazının ayarlanması




1 Accu-Chek FastClix parmak delme cihazını tanıyın.

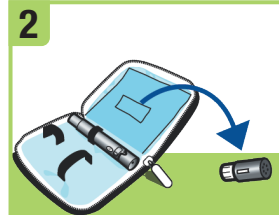



2 Lanset tamburunu taşıma çantasındaki cepten çıkarın.

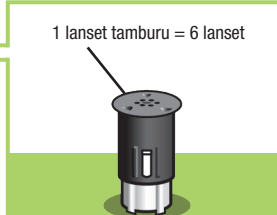

NOT
Her lanset tamburunda 6 steril lanset vardır.

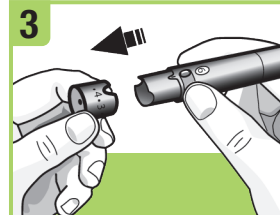


3 Kapağı düz bir şekilde dışarı çekerek çıkarın. Kapağı döndürmeyin.

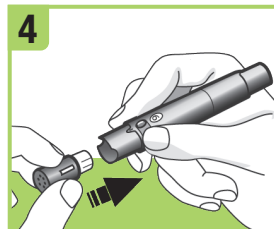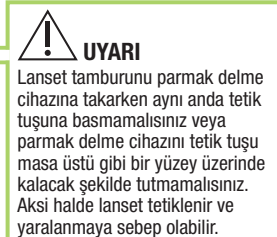


4 Lanset tamburunu beyaz uç önde olacak şekilde parmak delme cihazına takın. Lanset tamburunu tık sesi ile yerine oturana kadar tamamen itin.



NOT
6 lansetin tümü kullanılına kadar lanset tamburunu çıkarmayın; çünkü lanset tamburu parmak delme cihazından bir kez çıkarılırsa bir daha kullanılamaz.

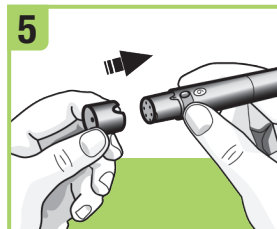

5 Parmak delme cihazının kapağını yerine takın. Kapaktaki çentiğin parmak delme cihazındaki çentikle hizalandığından emin olun.

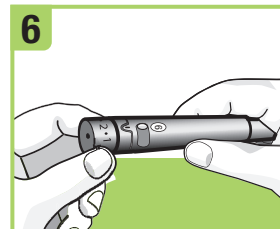


6 Lanset derinliğini uygun bir delme derinliğine ayarlayın. 2 ile başlayın. Daha kalın ciltler için daha yüksek bir sayı seçin.




Ölçüme hazır olduğunda...
Parmak delme cihazını kullanma: Tetik tuşuna basıldığında parmak delme cihazı hazırlanır ve 1 tıklı deriyi deler.


Kan şekeri ölçümünün gerçekleştirilmesi

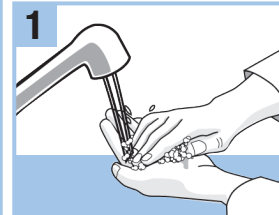


1 Ellerinizi ılık sabunlu su ile yıkayın ve iyice kurulayın.

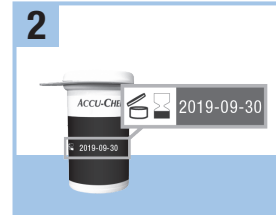


2 Ölçüm çubuğu şişesindeki son kullanma tarihini kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş ölçüm çubuklarını kullanmayın.

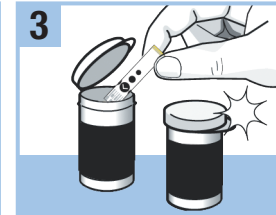


3 Ölçüm çubuğu şişesinden bir ölçüm çubuğu çıkarın. Kapağı sıkıca kapatın.

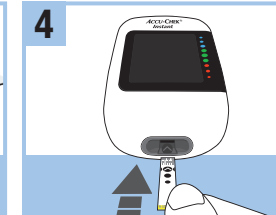


4 Ölçüm çubuğunun metal ucunu ölçüm cihazına yerleştirin. Ölçüm cihazı açılır.

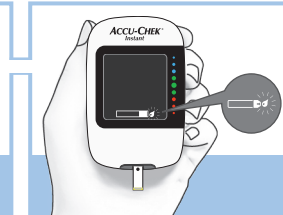



Yanıp sönen damla sembolü görünür.

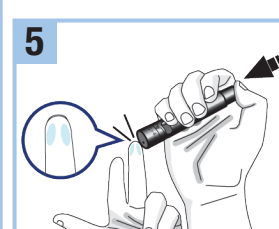


5 Parmak delme cihazını parmak ucunuzun kenarına sıkıca bastırıp, parmağınızı delmesi için tetik tuşuna basın.

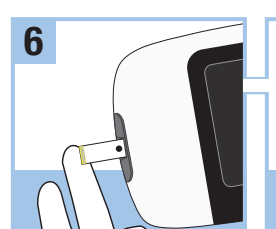

6 Ölçüm çubuğunun sarı ucunu kan damlasına dokundurun. Yanıp sönen kum saati sembolü görüldüğünde parmağınızı ölçüm çubuğundan çekin. Ölçüm çubuğunun üstüne kan damlatmayın.

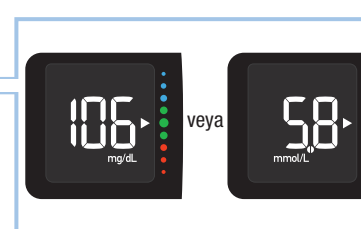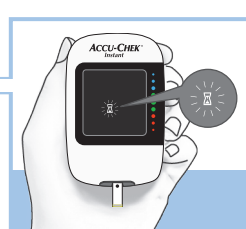

4 saniyeden kısa bir sürede ölçüm sonucu ekranda görüntülenir.

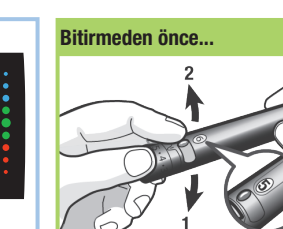

Bitirmeden önce...
Parmak delme cihazını sonraki ölçüm için hazırlayın. Sonraki lansete geçmek için kaydırma düğmesini ileri doğru kaydırıp geri çekin. Pencerede kalan lanset sayısı gösterilir.