



Az ujjbegyszűrő beállítása

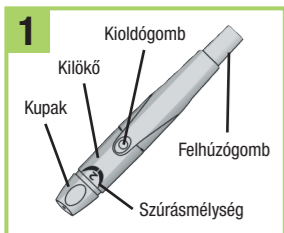


Ismerje meg az Accu-Chek Softclix ujjbegyszűrőt.




Vegye ki a lándzsát a tartó-tok zsebéből.

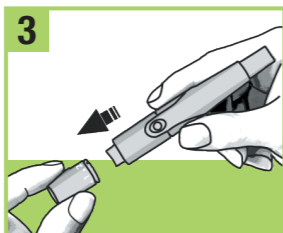


Távolítsa el a kupakot úgy, hogy egyenesen lehúzza. Ne csavarja el a kupakot.

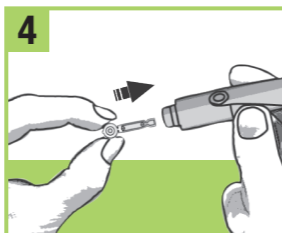

Nyomja a lándzsát az ujjbegyszűrőbe addig, amíg az a helyére nem kattán.

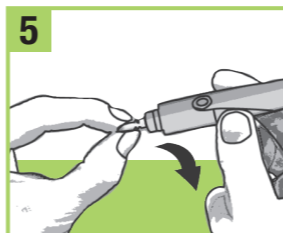


Csavarja le a lándzsa védőkupakját.

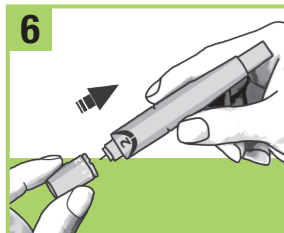

Helyezze vissza a kupakot az ujjbegyszűrőre. Ügyeljen rá, hogy a kupak rovátkája egy vonalban legyen a ujjbegyszűrő rovátkájával.



Állítsa be a lándzsa szűrőmélységét egy kényelmes behatolási szintre. Kezdje 2-vel. Keményebb bőr esetén válasszon nagyobb számot.

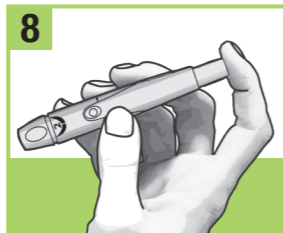


Nyomja be a felhúzógombot, ameddig lehet, mint egy tollat. Ne nyomja meg a kioldógombot, amíg a felhúzógomb be van nyomva. A kioldógomb sárgává változik, amint az ujjbegyszűrő készen áll.




Tegye félre az ujjbegyszűrőt, ameddig készen áll arra, hogy megszurja az ujját.

Vércukormérés elvégzése

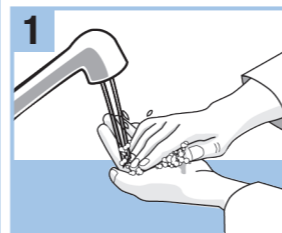


Mossa meg a kezét meleg, szappanos vízzel és alaposan szárítsa meg.

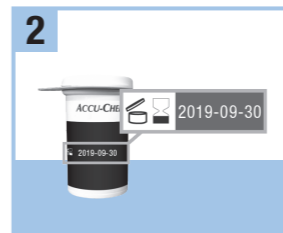


Ellenőrizze a tesztcsík tégelyen a szavatossági időt. Ne használja a tesztcsíkot, ha a szavatossági idő lejárt.




Vegye ki a tesztcsíkot a tesztcsík tégelyből. Szorosan zárja le a kupakot.

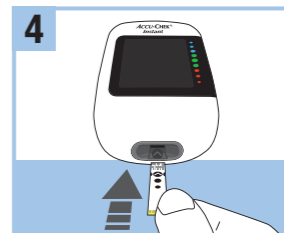


Helyezze be a tesztcsík fémcsip végét a vércukormérőbe. A vércukormérő bekapcsol.

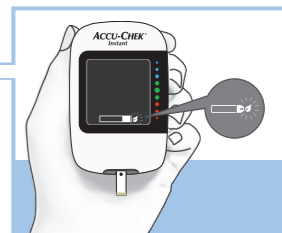



Megjelenik egy villogó csepp szimbólum.

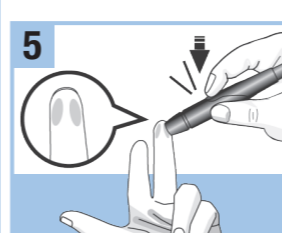

Nyomja hozzá erősen az ujjbegyszűrőt ujjbegyének oldalához és nyomja meg a sárga kioldógombot, hogy megszurja az ujját.

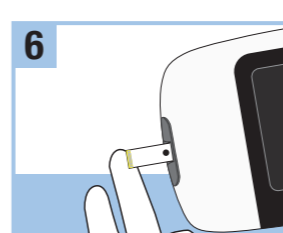

Érintse hozzá a tesztcsík **sárga szélét** a vércsepphez. Vegye le az ujját a tesztcsíkról, amikor megjelenik a villogó homokóra szimbólum. Ne cseppentsen vércseppet a tesztcsík tetejére.

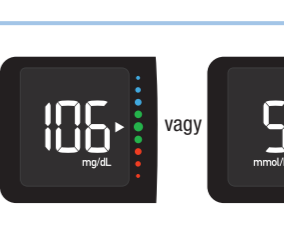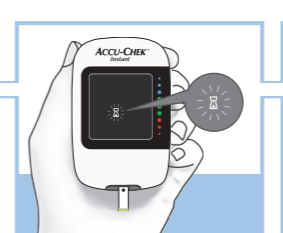

A mért vércukorérték kevesebb, mint 4 másodperc alatt megjelenik a kijelzőn.



Távolítsa el az ujjbegyszűrő kupakját. A lándzsa Önrel ellentétes irányba mutasson. Tolja előre a kiliőkö, hogy a lándzsa kiliőkődjön.