

Göra inställningar för bolusräknaren (PRO-funktion)

OBS: För att kunna använda bolusräknaren är det viktigt att du känner till dina personliga inställningar. Tex, hur mycket insulin just du behöver för att sänka blodsockret en viss nivå eller hur mycket insulin du behöver för en viss mängd förtärda kolhydrater. Därför ska du alltid rådgöra med vårdpersonal innan du gör de personliga inställningarna för bolusräknaren i mySugr.


Du kan läsa om bla kolhydraträkning, insulinkänslighet och kolhydratkvot i vår broschyr *Handbok kolhydraträkning* som du hittar här:

<https://www.accu-check.se/broschyer>

1. Klicka på meny symbolen längst upp till höger på skärmen.



2. Klicka på *Profil & Inställningar*

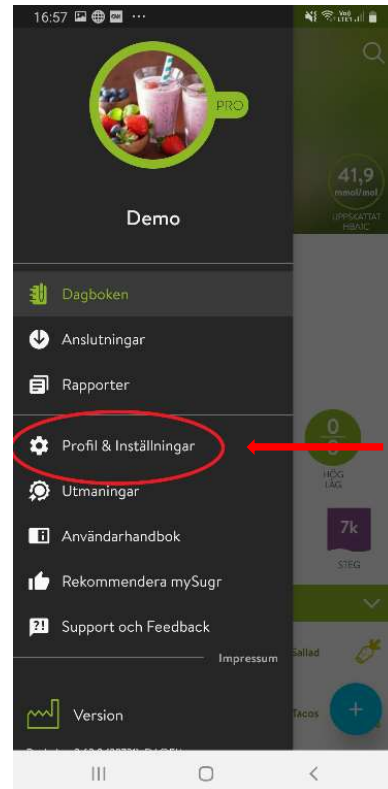

3. Klicka på *Inställningar*



Besök gärna www.accu-check.se/mysugr för att läsa mer om mySugr och du är alltid välkommen att kontakta Accu-Chek kundsupport på **020-41 00 42** om du har frågor om någon av våra produkter.


4. Aktivera Bolusräknare och klicka sen på Bolusräknarinställningar




5. Klicka på Starta Inställningen




6. Fyll i din personliga kolhydrat / insulin-kvot. Klicka på Nästa när du är klar

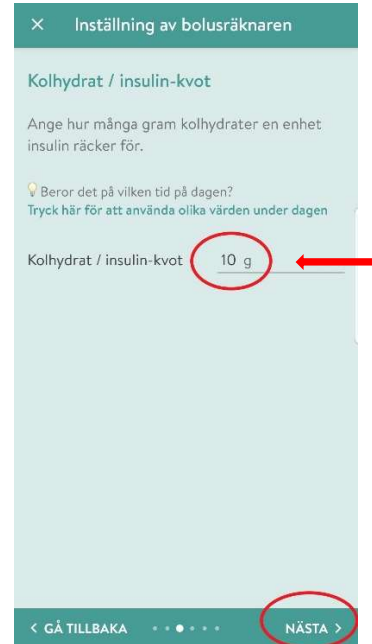

7. Fyll i din personliga Insulin-Korrektionsfaktor. Klicka på Nästa när du är klar

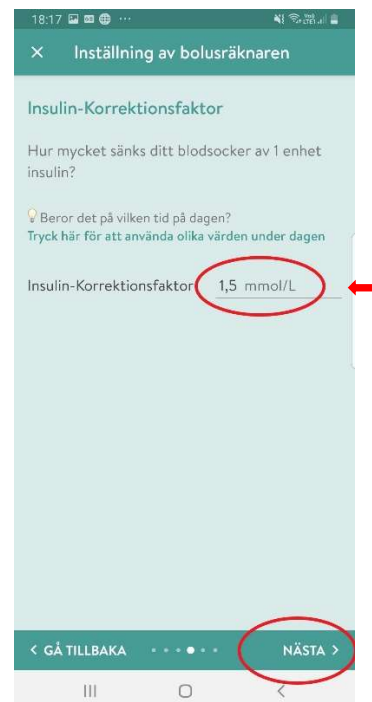

8. Fyll i ditt personliga blodsockermålvärde.
Klicka på *Nästa* när du är klar.

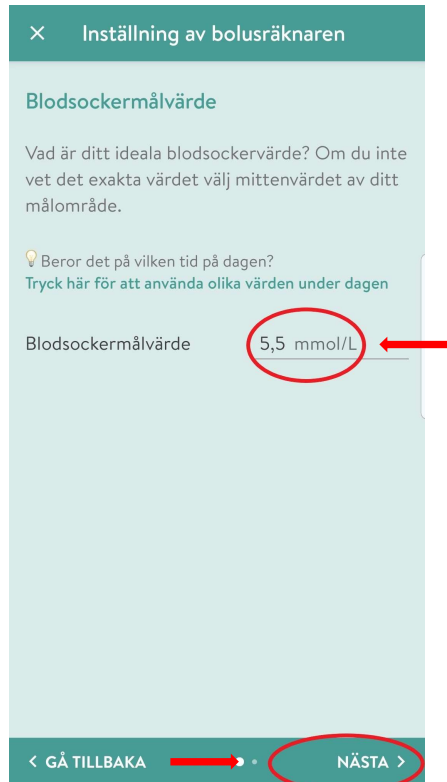

Inställning av bolusräknaren

Blodsockermålvärde


Vad är ditt ideala blodsockervärde? Om du inte vet det exakta värdet välj mittenvärdet av ditt målområde.

Beror det på vilken tid på dagen?
Tryck här för att använda olika värden under dagen

Blodsockermålvärde 5,5 mmol/L

< GÅ TILLBAKA NÄSTA >

9. Kontrollera att dina inställningar är korrekta och klicka på *Bekräfta och börja beräkna* när du säkerställt att de är det.

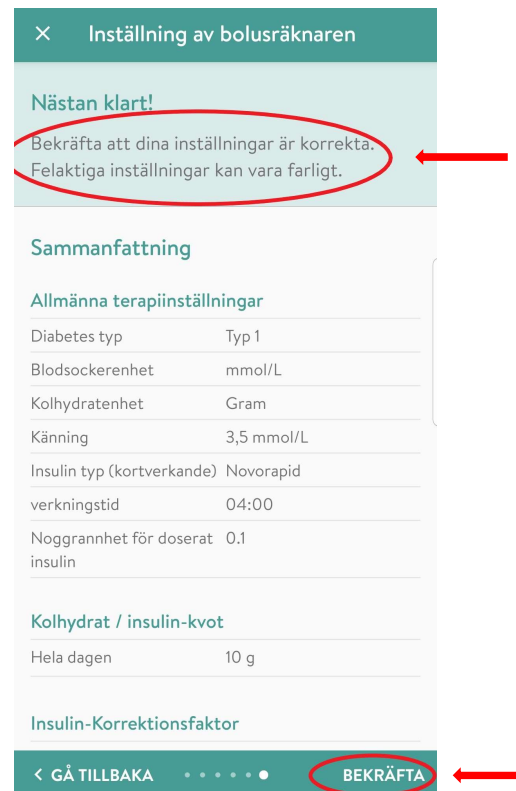

Inställning av bolusräknaren

Nästan klart!

Bekräfta att dina inställningar är korrekta.
Felaktiga inställningar kan vara farligt.

Sammanfattning

Allmänna terapinställningar

Diabetes typ	Typ 1
Blodsockerenhet	mmol/L
Kolhydratenhet	Gram
Känning	3,5 mmol/L
Insulin typ (kortverkande)	Novorapid
verkningstid	04:00
Noggrannhet för doserat insulin	0.1

Kolhydrat / insulin-kvot

Hela dagen	10 g
------------	------

Insulin-Korrektionsfaktor

< GÅ TILLBAKA BEKRÄFTA