

Anslut din Accu-Chek blodsockermätare* till mySugr

* Kompatibla blodsockermätare Accu-Chek Instant, Accu-Chek Guide och Accu-Chek Mobile trådlös adapter

Komma igång med mySugr och Accu-Chek blodsockermätare*

1. Aktivera Bluetooth på din smartphone. Använd din smartphones bruksanvisning vid behov.
2. Öppna sidomenyn i appen mySugr och hitta "Anslutningar".



3. Välj "Accu-Chek® Instant eller Guide "& tryck" Anslut "



4. Stäng av din mätare
5. Håll mätarknappen intryckt i 5 sekunder

6. uppmaning, ange nummer som visas på baksidan av mätaren



7. När kopplingen har lyckats, kommer mätaren att visa ordet "Ok".