

# Empiece aquí

## Guía rápida de instrucciones



### ADVERTENCIA

- Esta guía rápida de instrucciones no reemplaza a las instrucciones de uso del medidor de glucemia Accu-Chek Guide. Las instrucciones de uso contienen importantes instrucciones de manejo así como información adicional.
- El dispositivo de punción solo es apto para uso personal.

### Resumen




- 1 Pantalla
- 2 Tecla Atrás
- 3 Teclas flecha arriba y flecha abajo
- 4 Tecla On/Off/Set/OK
- 5 Ranura de la tira reactiva con luz
- 6 Tapa del compartimento de las pilas
- 7 Puerto micro USB
- 8 Eyector de tiras reactivas

### Ajustar el idioma y el formato de hora



Encienda el medidor pulsando brevemente . Aparece el menú **Language** (Idioma). Pulse o para resaltar el idioma deseado. Pulse .

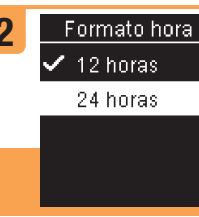


Aparece el menú **Formato hora**. Pulse o para resaltar **12 horas** (am/pm) o **24 horas**. Pulse para guardar la opción y volver al **Menú principal**.

### Ajustar el dispositivo de punción



Familiarícese con el dispositivo de punción Accu-Chek FastClix.

1 cartucho de lancetas = 6 lancetas

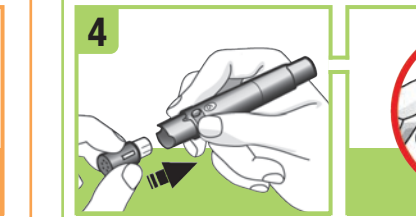


Inserte el cartucho de lancetas, con el extremo blanco por delante, en el dispositivo de punción. Empuje el cartucho de lancetas hasta el tope, hasta que encaje perceptiblemente en su sitio.




Saque el cartucho de lancetas del bolsillo del estuche.

**NOTA**  
Cada cartucho de lancetas contiene 6 lancetas estériles.

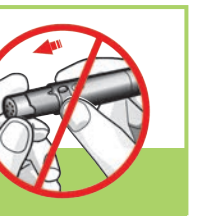


Vuelva a poner el capuchón en el dispositivo de punción. Asegúrese de que la muesca del capuchón esté alineada con la muesca del dispositivo de punción.

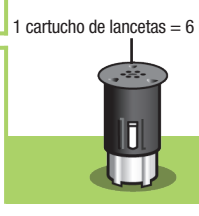

Retire el capuchón tirando de él directamente hacia fuera. El capuchón no es de rosca.

**ADVERTENCIA**  
No debe insertar el cartucho de lancetas en el dispositivo de punción y pulsar al mismo tiempo el botón disparador, o sujetar el dispositivo de punción con el botón disparador posando sobre una superficie tal como lo puede ser una mesa. Esto podría disparar una lanceta y causar daños inadvertidamente.

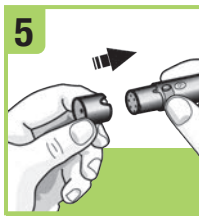


Use el dispositivo de punción: Al pulsar el botón disparador, el dispositivo de punción se tensa y pincha con 1 clic.




Ajuste la profundidad de punción a un nivel cómodo. Empiece con la profundidad 2. Si su piel es callosa o gruesa, empiece con un ajuste mayor.

**NOTA**  
No retire el cartucho de lancetas hasta que haya usado las 6 lancetas, ya que el cartucho de lancetas no se puede volver a usar una vez retirado del dispositivo de punción.

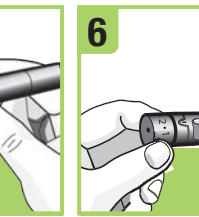


Prepare el dispositivo de punción para la siguiente medición. Para avanzar hasta la siguiente lanceta, deslice la palanquita hacia delante y hacia atrás una vez. La ventana muestra el número de lancetas restantes.

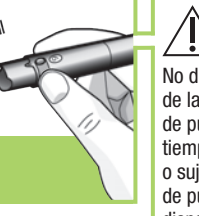

Coloque el dispositivo de punción presionando firmemente contra el lateral de la yema del dedo y pulse el botón disparador para efectuar una punción.

Roce el **borde amarillo** de la tira reactiva con la gota de sangre. No aplique sangre encima de la tira reactiva.

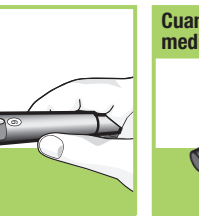

El resultado de medición aparece en la pantalla en menos de 4 segundos.




Retire el dedo de la tira reactiva cuando aparezca **Analizando**. No aplique sangre encima de la tira reactiva.

El medidor se enciende. Aparece **Preparando la medición**.




Prepare el dispositivo de punción para la siguiente medición. Para avanzar hasta la siguiente lanceta, deslice la palanquita hacia delante y hacia atrás una vez. La ventana muestra el número de lancetas restantes.

### Realizar una medición de glucemia

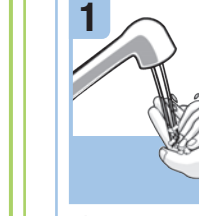

Lávese las manos y séquelas antes de realizar una medición de glucemia.

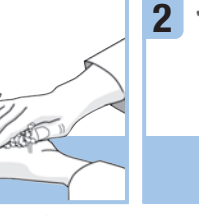


Compruebe la fecha de caducidad del tubo de tiras reactivas. No use las tiras reactivas pasada su fecha de caducidad.




Extraiga una tira reactiva del tubo de tiras reactivas. Cierre el tubo herméticamente con la tapa.




Inserte el extremo metálico de la tira reactiva en el medidor.

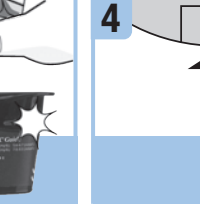

El medidor se enciende. Aparece **Preparando la medición**.

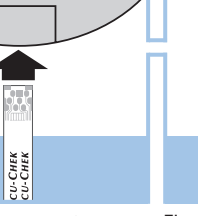

Coloque el dispositivo de punción presionando firmemente contra el lateral de la yema del dedo y pulse el botón disparador para efectuar una punción.

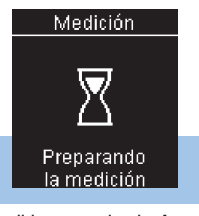

Roce el **borde amarillo** de la tira reactiva con la gota de sangre. No aplique sangre encima de la tira reactiva.



El resultado de medición aparece en la pantalla en menos de 4 segundos.



Retire el dedo de la tira reactiva cuando aparezca **Analizando**. No aplique sangre encima de la tira reactiva.



El resultado de medición aparece en la pantalla en menos de 4 segundos.



Retire el dedo de la tira reactiva cuando aparezca **Analizando**. No aplique sangre encima de la tira reactiva.



El resultado de medición aparece en la pantalla en menos de 4 segundos.



Retire el dedo de la tira reactiva cuando aparezca **Analizando**. No aplique sangre encima de la tira reactiva.



El resultado de medición aparece en la pantalla en menos de 4 segundos.



Retire el dedo de la tira reactiva cuando aparezca **Analizando**. No aplique sangre encima de la tira reactiva.

Descargue la aplicación para el tratamiento de la diabetes Accu-Chek Connect\* en:



\*Disponible para dispositivos móviles seleccionados.

FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN: 2016-05

Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, ACCUCHEK CONNECT, ACCUCHEK GUIDE y FASTCLIX son marcas registradas de Roche.

APPLE, el logotipo de APPLE y APP STORE son marcas comerciales de Apple Inc.

GOOGLE PLAY es una marca comercial de Google Inc.

© 2016 Roche Diabetes Care  
07828705001-0616  
07828705001(01)-0616



# Inicie aqui

## Guia de primeiros passos



### ADVERTÊNCIA

- Este guia de primeiros passos não substitui as instruções de uso do seu monitor de glicemia Accu-Chek Guide. As instruções de uso contêm instruções de manuseio e informações adicionais importantes.
- O lancetador destina-se apenas ao uso pessoal.

### Visão geral




- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1 Visor                               | 5 Fenda com iluminação para tira-teste |
| 2 Botão Voltar                        | 6 Tampa do compartimento das baterias  |
| 3 Botões setas para cima e para baixo | 7 Porta micro-USB                      |
| 4 Botão liga/desliga/configuração/OK  | 8 Ejetor de tira-teste                 |

### Definição do idioma e do formato da hora



Ligue o monitor de glicemia pressionando **OK** brevemente. **Language** (Idioma) aparecerá. Pressione **↵** ou **⏪** para destacar o idioma desejado. Pressione **OK**.

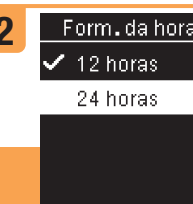


**Form. da hora** (Formato da hora) aparecerá. Pressione **↵** ou **⏪** para destacar **12 horas** (am/pm) ou **24 horas**. Pressione **OK** para confirmar a opção e voltar ao **Menu principal**.

### Preparação do lancetador




1 cartucho de lancetas = 6 lancetas

Familiarize-se com o lancetador Accu-Chek FastClix.

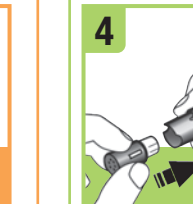


Introduza o cartucho de lancetas, pela extremidade branca, no lancetador. Empurre o cartucho de lancetas totalmente para dentro, até que se encaixe firmemente em posição.

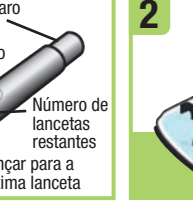

Retire o cartucho de lancetas do bolso interno do estojo para transporte.

**NOTA**  
Cada cartucho de lancetas contém 6 lancetas estéreis.

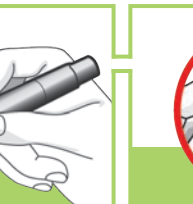

Recoloque a ponteira no lancetador. Certifique-se de que o recorte da ponteira esteja alinhado com a saliência curva do lancetador.



Retire a ponteira puxando-a em linha reta. Não gire a ponteira.

**ADVERTÊNCIA**  
Ao introduzir o cartucho de lancetas no lancetador, você não deve apertar simultaneamente o botão de disparo nem segurar o lancetador com o botão de disparo encostado em uma superfície, como o tampo de uma mesa. Isso poderia disparar uma lanceta e causar ferimentos inadvertidamente.




**Quando estiver pronto para o teste...**




Introduza o cartucho de lancetas, pela extremidade branca, no lancetador. Empurre o cartucho de lancetas totalmente para dentro, até que se encaixe firmemente em posição.

**NOTA**  
Não retire o cartucho de lancetas até que todas as 6 lancetas tenham sido usadas, pois o cartucho de lancetas não pode ser reutilizado depois de ter sido retirado do lancetador.

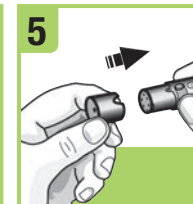


Ajuste a profundidade da lanceta a um nível de penetração confortável. Inicie com 2. Para peles mais espessas, selecione um número mais alto.

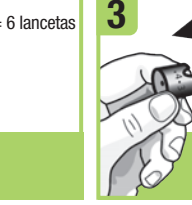

Utilização do lancetador: Ao apertar o botão de disparo, o lancetador é armado e faz uma punção com um só clique.

**ADVERTÊNCIA**  
Ao introduzir o cartucho de lancetas no lancetador, você não deve apertar simultaneamente o botão de disparo nem segurar o lancetador com o botão de disparo encostado em uma superfície, como o tampo de uma mesa. Isso poderia disparar uma lanceta e causar ferimentos inadvertidamente.

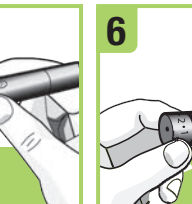


Pressione o lancetador firmemente contra a lateral da ponta do dedo e aperte o botão de disparo para fazer uma punção no dedo.




Encoste a **borda amarela** da tira-teste na gota de sangue. Retire o seu dedo da tira-teste quando **Analisando** aparecer. Não coloque sangue na parte de cima da tira-teste.

O resultado de glicemia aparecerá no visor em menos de 4 segundos.

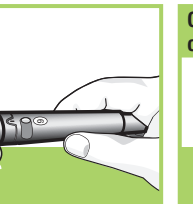


Prepare o lancetador para o próximo teste. Deslize uma vez o botão de alavanca para um lado e para o outro para avançar para a próxima lanceta. A janela mostra o número de lancetas restantes.

### Realização de um teste de glicemia

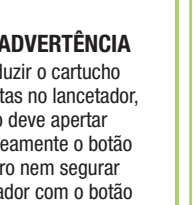


Lave e seque as mãos antes de realizar um teste de glicemia.

Verifique a data de validade indicada no frasco de tiras-teste. Não utilize tiras-teste vencidas.

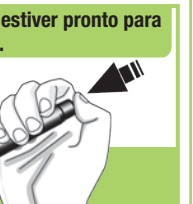


Introduza a ponta metálica da tira-teste no monitor de glicemia.

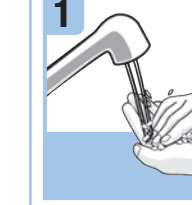


O monitor de glicemia irá ligar. **Preparando para o teste** aparecerá no visor.

Pressione o lancetador firmemente contra a lateral da ponta do dedo e aperte o botão de disparo para fazer uma punção no dedo.

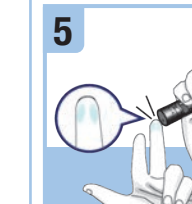


O resultado de glicemia aparecerá no visor em menos de 4 segundos.

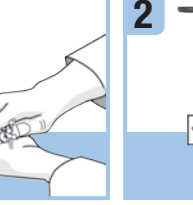

Encoste a **borda amarela** da tira-teste na gota de sangue. Retire o seu dedo da tira-teste quando **Analisando** aparecer. Não coloque sangue na parte de cima da tira-teste.

O resultado de glicemia aparecerá no visor em menos de 4 segundos.

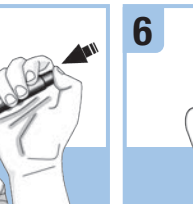

Prepare o lancetador para o próximo teste. Deslize uma vez o botão de alavanca para um lado e para o outro para avançar para a próxima lanceta. A janela mostra o número de lancetas restantes.

Baixe gratuitamente o aplicativo para o controle do diabetes Accu-Chek Connect\* em:



\*Disponível para alguns dispositivos móveis.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 2016-05

Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, ACCUCHEK CONNECT, ACCUCHEK GUIDE e FASTCLIX são marcas da Roche.

APPLE, o logótipo da APPLE e APP STORE são marcas registradas da Apple Inc.

GOOGLE PLAY é uma marca registrada da Google Inc.

© 2016 Roche Diabetes Care  
07828705001-0616  
07828705001(01)-0616

